


支柱・あぶみの仕上げを美しく・簡単に

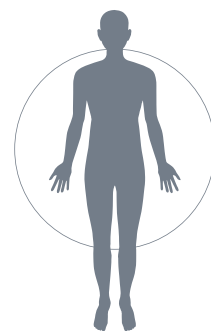


# ヒシチューブ



支柱・あぶみの仕上げを美しく・簡単に

# ヒシチューブ

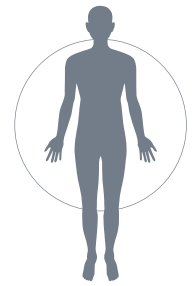

## 《加工手順》


お好みの色に合わせて手軽に加工できます。

STEP  
1



ヒシチューブを支柱寸法よりも50mm程度長めにカットして支柱に被せます。

STEP  
2

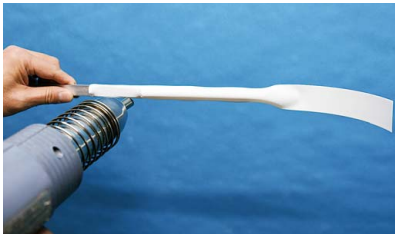

ヒートガンで全体的に熱します。  
※ヒートガンで熱しすぎるとチューブが溶けて破れることがありますのでご注意ください。

STEP  
3



支柱端のR加工部を軽く引っ張りながら捻ります。

STEP  
4



余分な部分を切り取り完成です。



ヒシチューブ(ブラック)使用例



ホワイト



ベージュ



ブラック



グリーン

Color ※色はホワイト/ベージュ/ブラック/グリーンがあります。

## 《製品規格》

販売単位(m)		
100	50	10



カラー	折系	肉厚	推奨支柱寸法(幅×厚さ mm)
ホワイト	30mm	0.2mm	16×4mm~18×5mm
ベージュ			
ブラック			
グリーン			

●掲載の写真は実際とは多少異なる場合がございます

取扱店

製造・販売元

株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20  
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<http://www.tokuda-orthotech.co.jp>