

病床時の足関節不良肢位に


足関節良肢位保持装具


FOOT NAVIGATION

フットナビ

意匠登録

登録 第1151585号

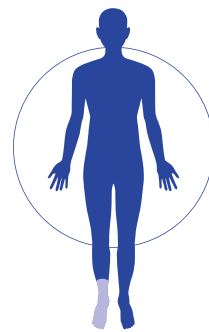

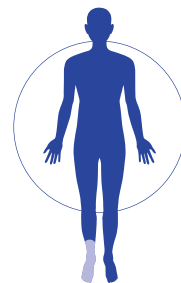

装着したまま体位変換が可能

前面装着タイプなので装着したまま側臥位や体位変換にも対応可能です。

装着感が良好

軽量のスポンジ素材で構成されているため装着感が良好です。そのため長期臥床による足関節の良肢位保持に最適です。

また、外旋防止枕を使用すると臥位での良肢位保持がより安定します。

装着 手順

- ① 本体クッションを足背面に合わせます。
 - ② 付属のネオプレンバンドを
踵部のくりぬき合わせて本体に貼り付けます。
 - ③ 前足部足底にネオプレンバンドを当て、
引張りながら本体に貼り付けます。
 - ④ 下腿部にネオプレンバンドを当て、
本体に貼り付けます。
- 以上で装着完了です。
(※足部外旋防止枕は必要に応じて使用してください。)

《製品規格》

品 番	TO-600
製品寸法(cm)	高さ20×横30×幅12
サイズ	フリー
質 量	250g



〈外旋防止枕なし〉



〈外旋防止枕あり〉

足関節の良肢位保持が
より安定します。



〈装着前〉



〈装着後〉

※掲載の写真は実際とは多少異なる場合がございます

取扱店

製造・販売元



株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<http://www.tokuda-orthotech.co.jp>